

iM3[®]

THE GLOBAL NAME IN VETERINARY DENTISTRY

M1001

DENTAL MAT

Lze prát v pračce při 60 °C / 140 °F

- Nepřekračujte teplotu 60°C / 140 °F
- Používejte standardní prací prostředky
- Doporučujeme používat sítku na praní jemných tkanin
- Nízké odstředování (vysoké odstředování může způsobit poškození podložky).

Není vhodné pro:

- Sušit v sušičce
- Žehlení
- Autoklávování
- Vysoký stupeň odstředování

Recyklace po skončení životnosti - iM3 objednávací kód M1001

Vyrobeno z polyfenylenetheru (PPE)

Vyrobeno v Německu pro iM3.

iM3 Dental Ltd. Ireland - sales@im3dental.com
iM3 Pty Ltd. Australia - sales@im3vet.com
iM3 Inc. Vancouver, WA USA - info@im3usa.com



iM3[®]

THE GLOBAL NAME IN VETERINARY DENTISTRY

M1001

DENTAL MAT

Lze prát v pračce při 60 °C / 140 °F

- Nepřekračujte teplotu 60°C / 140 °F
- Používejte standardní prací prostředky
- Doporučujeme používat sítku na praní jemných tkanin
- Nízké odstředování (vysoké odstředování může způsobit poškození podložky).

Není vhodné pro:

- Sušit v sušičce
- Žehlení
- Autoklávování
- Vysoký stupeň odstředování

Recyklace po skončení životnosti - iM3 objednávací kód M1001

Vyrobeno z polyfenylenetheru (PPE)

Vyrobeno v Německu pro iM3.

iM3 Dental Ltd. Ireland - sales@im3dental.com
iM3 Pty Ltd. Australia - sales@im3vet.com
iM3 Inc. Vancouver, WA USA - info@im3usa.com

